




СПАС ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ НАКЛАДАННЯ ТУРНІКЕТУ ДВОМА РУКАМИ

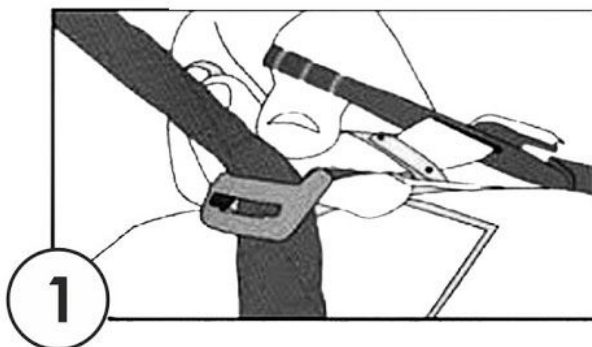


1. Накласти турнікет вище кровоточивого місця. Обернути стрічку (бандаж) навколо кінцівки і просунути кінець в пряжку. Затягнути стрічку тісно.

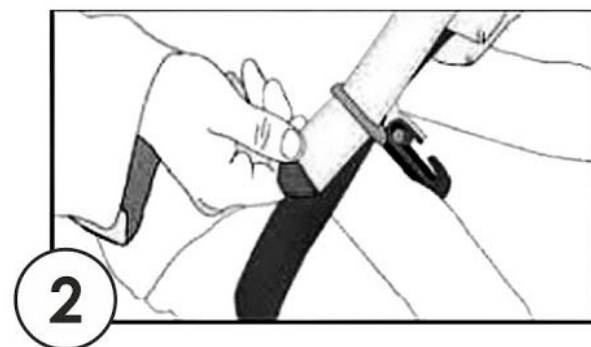


2. Протягнути кінець в зовнішню частину пряжки. Таким чином турнікет буде попередньо зафіксованим на потрібному місці.

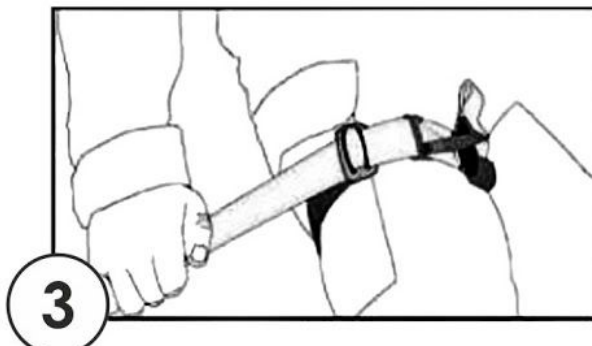


3. Потягнувши за кінець, дуже туго затягнути стрічку і зафіксувати її за допомогою липучки.

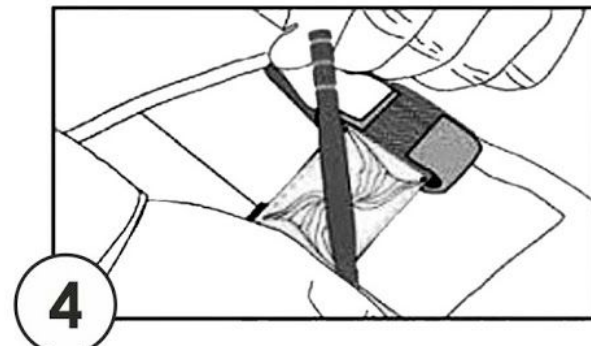

4. Крутити стержень до зупинки артеріальної кровотечі (яскраво-червона) і відсутності дистального пульсу (пульс в кінцівці не прощупується)

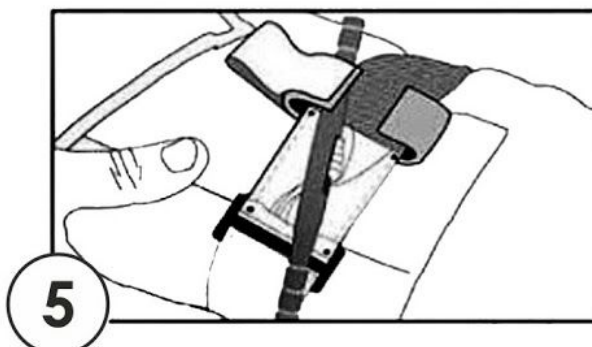


5. Зафіксувати стержень в кліпсі. Перевірити дистальний пульс та кровотечу. Якщо кровотеча не зупинилась, тоді: або затягнути сильніше турнікет, або накласти біля нього (вище першого) ще один турнікет. Перевірити дистальний пульс та кровотечу.

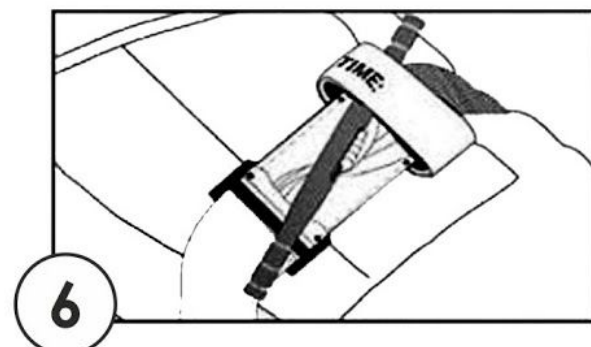

6. Надійно зафіксувати стержень всередині затискача за допомогою білої липучої стрічки. На ній вказати час накладання турнікету. Підготувати пацієнта для транспортування та впевнитись чи припинилась кровотеча.

СПАС ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ НАКЛАДАННЯ ТУРНІКЕТУ ОДНІЄЮ РУКОЮ

1. Накласти турнікет вище кровоточивого місця. Просунути поранену кінцівку в сформовану стрічкою петлю.

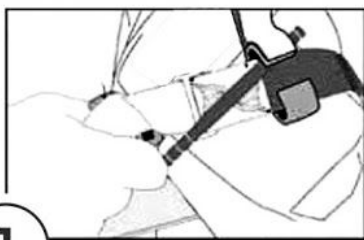


1

2. Дуже туго затягнути стрічку і зафіксувати її за допомогою липучки.



2

3. Приліпити стрічку навколо кінцівки. Кінець стрічки залишається вільно висячим.

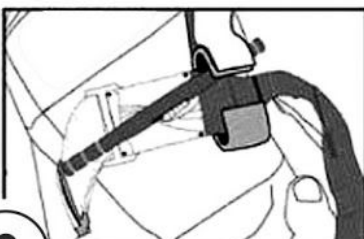


3

4. Крутити стержень до зупинки артеріальної кровотечі (яскраво-червона) і відсутності дистального пульсу (пульс в кінцівці не прощупується).




4

5. Зафіксувати стержень в кліпсі. Перевірити дистальний пульс та кровотечу. Якщо кровотеча не зупинилась, тоді: або затягнути сильніше турнікет, або накласти біля нього (вище першого) ще один турнікет. Перевірити дистальний пульс та кровотечу.

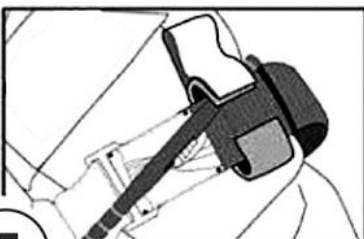


5

6. Протягнути вільний кінець стрічки (див мал.3) через кліпсу поверх стержня і закріпити стрічку по всій її довжині навколо кінцівки, фіксуючи при цьому стержень.

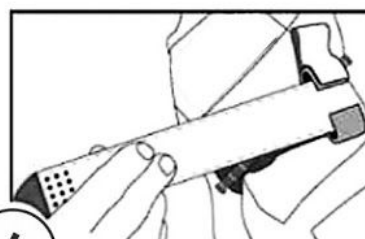


6

7. Надійно зафіксувати стержень всередині кліпси за допомогою білої стрічки. На ній вказати час накладання турнікету. Підготувати пацієнта для транспортування та впевнитись чи припинилась кровотеча.

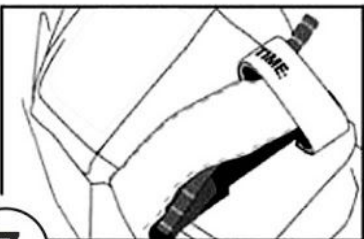


7


ЗБЕРІГАННЯ ТУРНІКЕТУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ОДНІЄЮ РУКОЮ

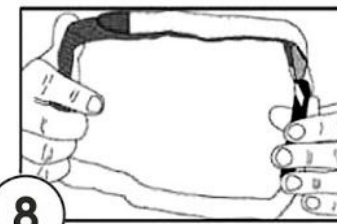

8

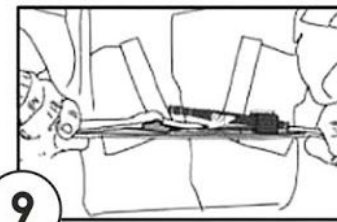

9

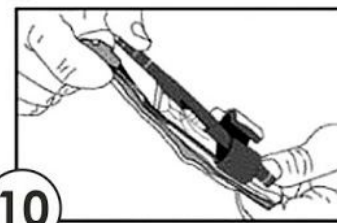

10

*ЗАВЖДИ ЗБЕРІГАЙТЕ ТУРНІКЕТ СКЛАДЕНИМ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ОДНІЄЮ РУКОЮ.

8. Протягнути кінець стрічки через внутрішню щілину пряжки. Витягнувши 15 см стрічки, скласти її в протилежному напрямку, зафіксувавши її за допомогою липучки.

9. Вирівняти сформовану зі стрічки петлю. Пряжка повинна знаходитись приблизно посередині поверхні.

10. Турнікет скласти навпіл, щоб пряжка була на зовнішньому кінці конструкції. Турнікет готовий для використання.